


## Entkopplung und Neukopplung für Android

1. Öffnen Sie auf Ihrem Startbildschirm die App „Einstellungen“ und tippen Sie nun auf

2. Tippen Sie nun auf die Verbindungs-Option „Bluetooth“




3. Ihre Hörgeräte werden unter gekoppelte Geräte angezeigt. Tippen Sie hier auf das kleine Zahnrad

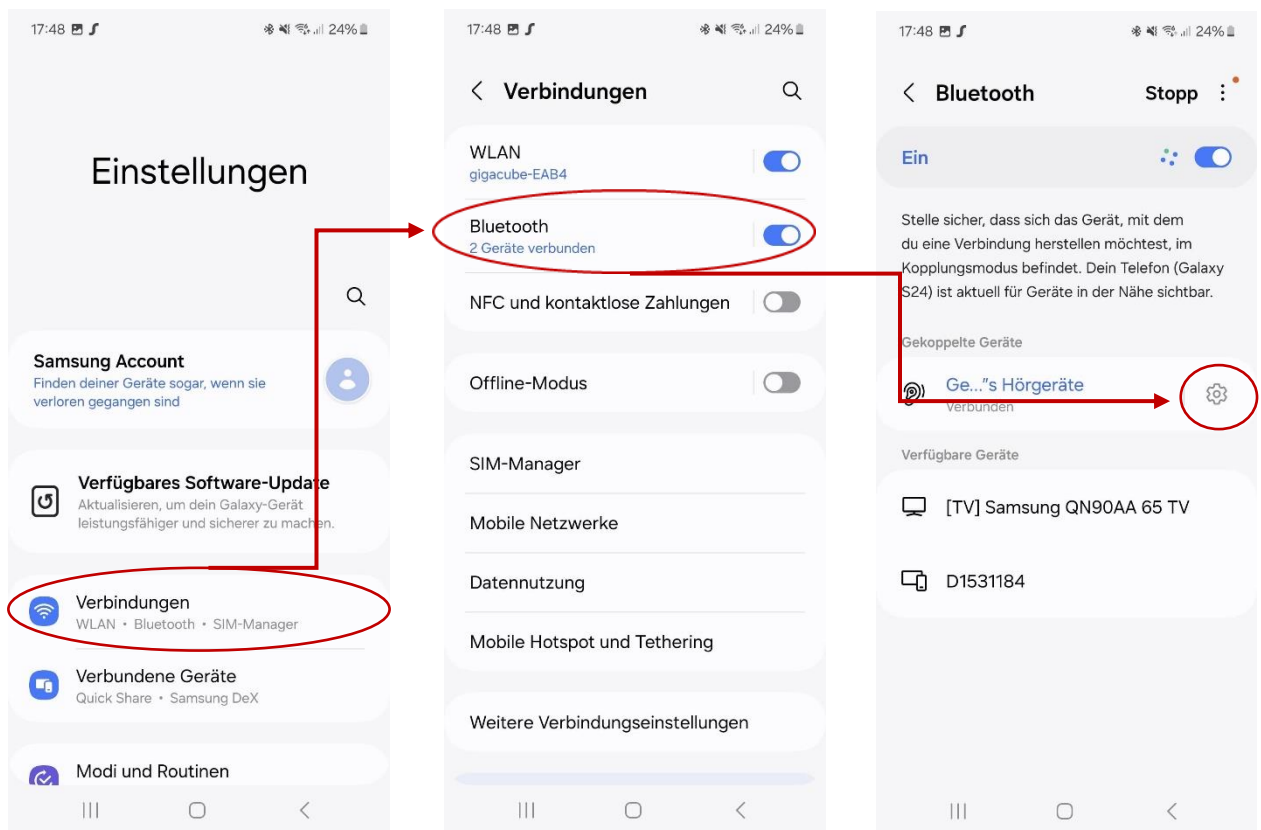

4. Um die Geräte zu entkoppeln, tippen Sie bitte auf „Entkoppeln“

5. Tippen Sie nun auf die Schrift „**Entkoppeln**“, um diesen Schritt zu finalisieren.




6. Um die App zu deinstallieren, halten Sie das App-Bild lange gedrückt und tippen Sie dann auf Deinstallieren.

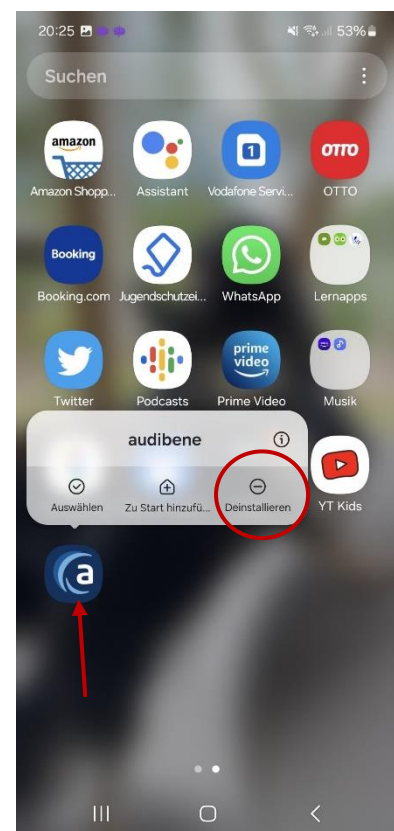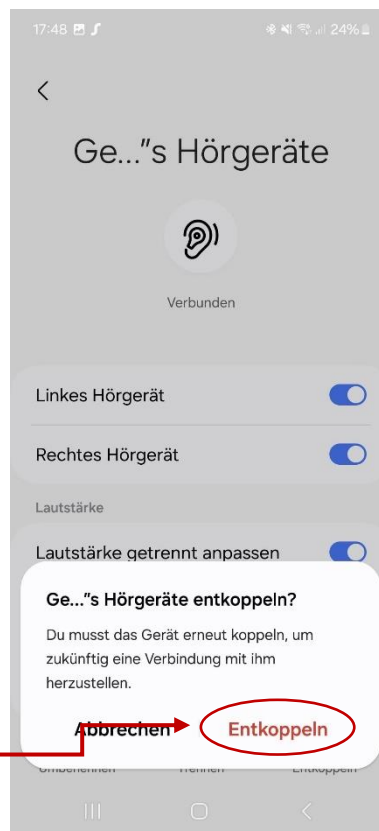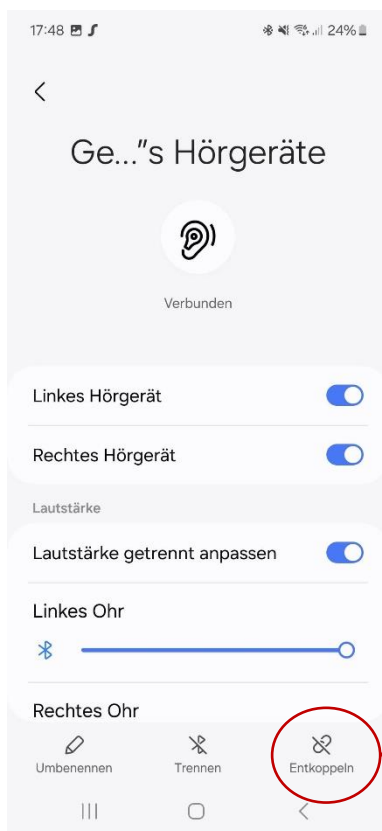

7. Bestätigen Sie die Deinstallation noch mit „OK“

8. Gehen Sie nun in den Play Store, diese App finden Sie auf dem Start-Bildschirm.



9. Nun Tippen Sie neben der Lupe auf das Suchfeld, um „audibene App“ zu suchen

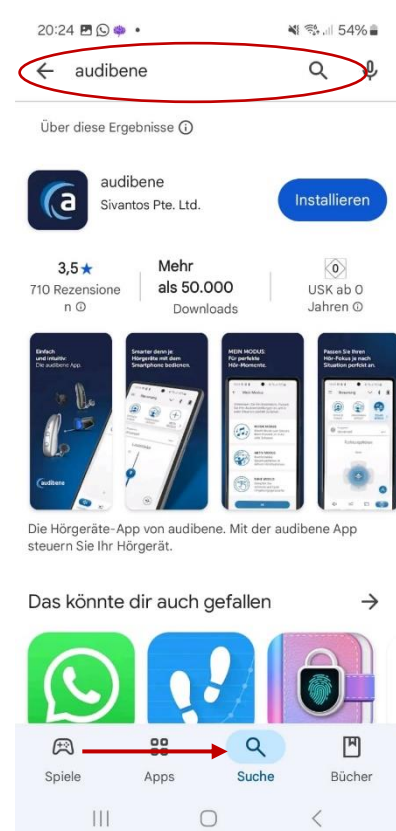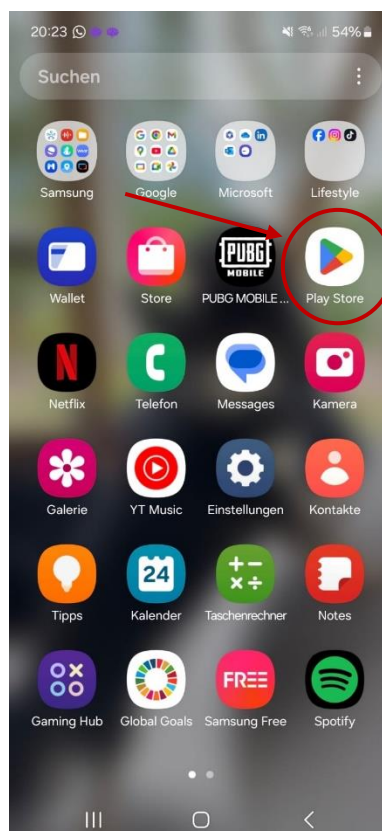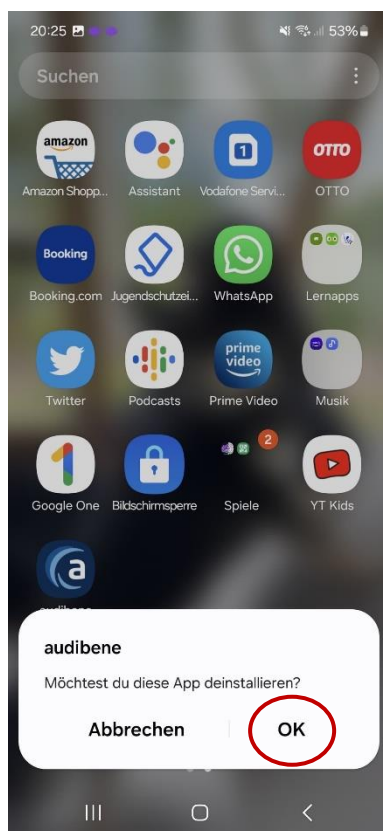

10. Installieren Sie nun die App auf Ihrem Smartphone

11. Nun können Sie die Audibene App öffnen und wählen Ihr Land „Switzerland“ aus, bevor Sie auf „Fortfahren“ tippen

12. Wählen Sie Verbindungs-Option „Bluetooth“ aus, um die Geräte mit der App zu koppeln


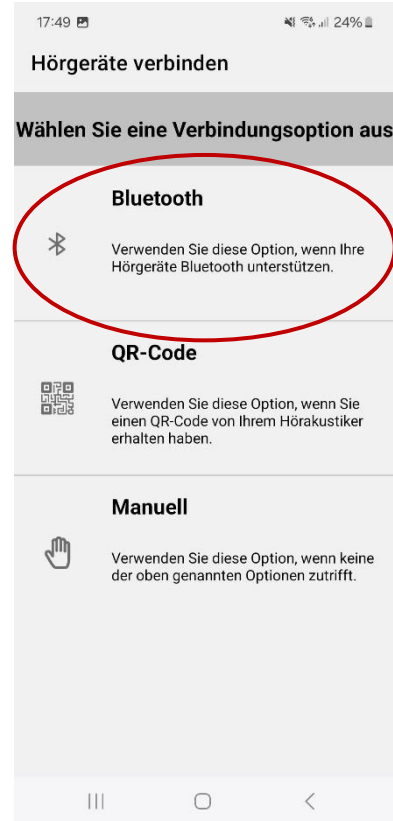
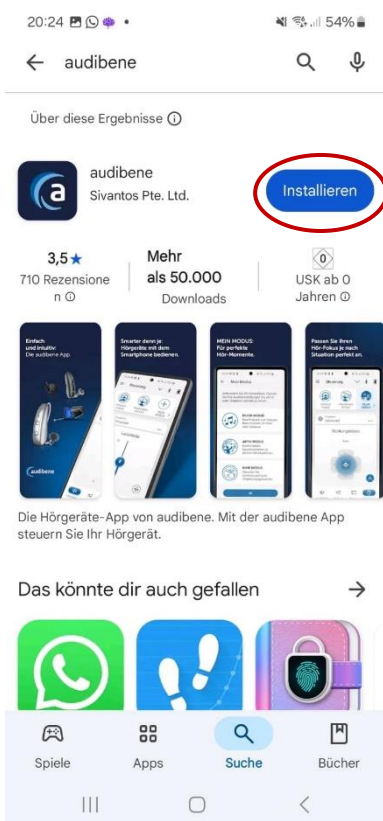


13. Um die Geräte verbinden zu können, tippen Sie auf „Zulassen“

14. Starten Sie nun die Hörgeräte neu, setzen Sie diese dafür in die Ladestation ein, wenn die LEDs aufhören zu blinken, setzen Sie die Hörgeräte wieder ins Ohr ein. Tippen Sie dann auf „OK“

15. Nach einer kleinen Weile werden Ihnen beide Geräte zum Auswählen angezeigt.



Sobald beide Seiten einen Haken haben, können Sie auf den Rechts-Pfeil tippen

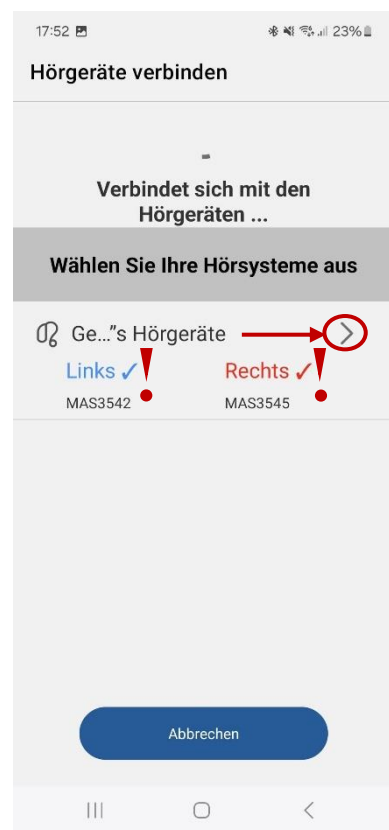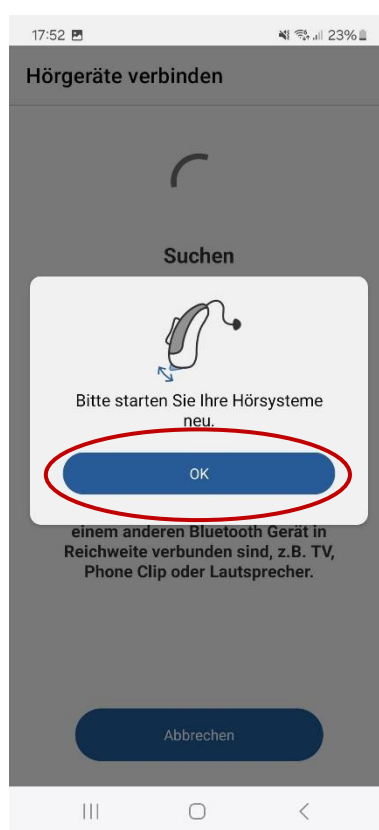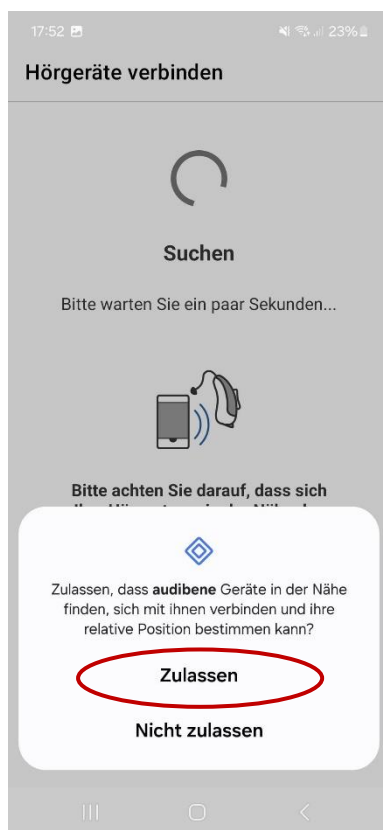

16. Sobald alle Daten erfolgreich ausgelesen wurde, können Sie auf „Los geht's“ tippen

17. Telecare können Sie nur mit einem Code einrichten, wenn Sie diesen nicht haben, gehen Sie gern auf „Später einrichten“

18. Nun ist die Verbindung wieder neu aufgebaut und alle Funktionen nutzbar

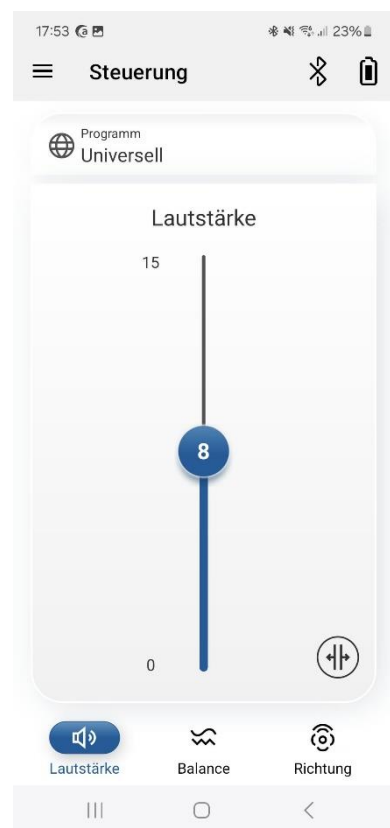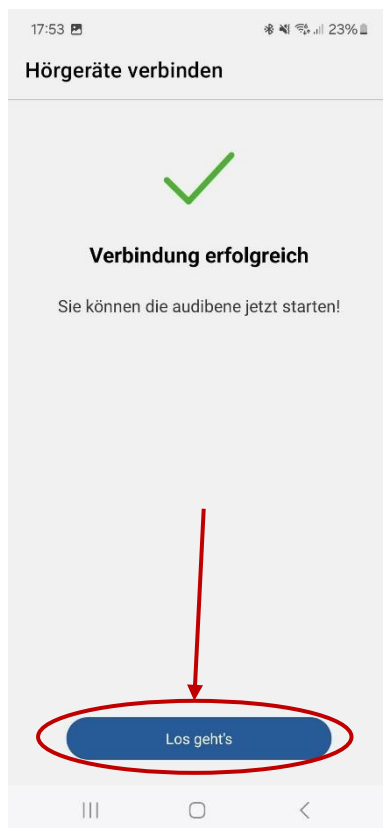


## Zurücksetzen der Audibene App

1. Zum Zurücksetzen der App, wählen öffnen Sie die App und tippen auf die 3 Striche oben links

2. Wählen Sie als nächstes die Option „Einstellungen“ aus

3. Als nächstes wählen Sie bitte „App-Einstellungen“ aus

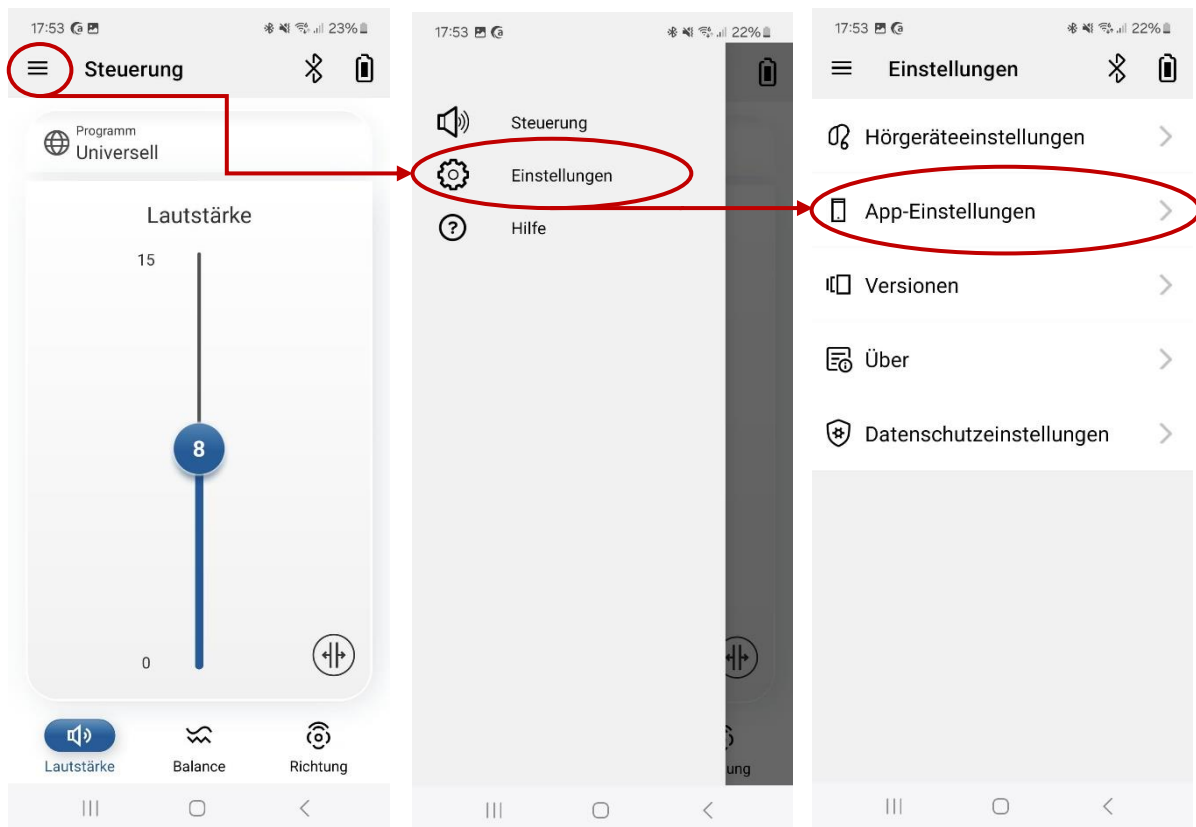



4. Wählen Sie nun  
„App einrichten“ aus

5. Die Meldung, dass die  
App in den  
Auslieferungszustand  
zurückgesetzt wird,  
bestätigen wir mit „OK“

6. Nun können Sie  
wieder neu die  
Verbindung aufbauen

